

Kojenecká váha "Cosy" 8310.02

Návod k obsluze



Kojenecká váha "Cosy" 8310.02

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek SOEHNLE Professional.

Všechny jeho funkce byly navrženy tak, aby zajistily co nejjednodušší používání. Máte-li jakékoliv připomínky, dotazy nebo problémy, které nejsou popsány v tomto návodu – obraťte se, prosím, na autorizovaného servisního partnera – firmu NETTO Electronics s.r.o. Praha. Základní informace a kontakty najdete na internetových stránkách www.vahyNetto.cz.

Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Tento návod popisuje standardní funkce 8310.02. Drobné odchylky se mohou vyskytnout u speciálních verzí.

1. Obsah balení

- S** 8310.02.001 Kojenecká váhy "Cosy"
- S** 4x AA baterie
- S** Návod k obsluze

Volitelné příslušenství:

- S** 5908.09.002 Napaječ 6V DC, 0,5 A

2. Postup vážení

2.1 Uvedení do provozu:

Dejte váhu na místo použití a zajistěte, aby byla umístěna vodorovně na pevném a rovném podkladu.

Vložte baterie do schránky ve spodní části váhy.

2.2 Zapnutí váhy

Stiskněte jedenkrát tlačítko ON/TARE. Po vlastní kontrole se zobrazí na displeji "0,000"

Váha je nyní připravena k užití.

Kojenecká váha "Cosy" 8310.02

2.3 Vážení

Položte dítě opatrně na váhu. Jakmile je váha stabilní, zobrazí se příznak ustálení **O** v pravém horním rohu displeje. Po zvednutí dítěte z váhy se hodnota hmotnosti automaticky vrátí na 0. Když se zobrazí "0,000", stisknutím tlačítka "RECALL" lze zobrazit naposledy uloženou hmotnost. Váha se po vážení automaticky vypne, pokud je po dobu 1 minuty v nečinnosti.

2.4 Funkce Tárování

Stisknutím tlačítka ON/TARE uvedeme váhu do provozu.

Během vážení opětovným stisknutím tlačítka ON/TARE váhu vytárujeme (na displeji se objeví "0,000"). Použití např. při položení izolační podložky (látkové pleny) pod dítě. Tárovat můžeme v celém vážicím rozsahu.

2.5 Funkce HOLD

Po ustálení vážení se aktuální váha automaticky zablokuje/přidrží (v levém horním rohu displeje se zobrazuje znak **O**). Po přidržení, přidání nebo snížení hmotnosti o více než 250 g se uvolní funkce přidržení a zobrazí aktuální hmotnost.

2.6 Funkce přepínání vážicích jednotek

Tato váha může zobrazovat hmotnosti v kg nebo lb. Pro změnu jednotek stiskněte tlačítko LB/KG a vyberte jednotku, ve které chcete vážit – kilogramy (kg) nebo libry (lb). Při vypnutí váhy se uloží poslední použitá jednotka.

2.7 Funkce MEM

Váha automaticky zaznamená do paměti hodnotu posledního vážení. Když se zobrazí "0,000", stiskem tlačítka RECALL tuto hodnotu vyvoláte. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí symbol **MEM** a údaj o hmotnosti.

Opětovným stisknutím tlačítka RECALL se vrátíte do režimu vážení. Minimální zatížení pro tuto funkci je > 1,0 kg.

2.8 Vypnutí

Váha se vypíná:

- Stisknutím tlačítka ON/TARA po dobu 3 sekund při údajích na displeji "0,000"
- Automaticky po 1 minutě od posledního vážení.

Kojenecká váha “Cosy“ 8310.02

2.9 Výměna baterie

Pokud se na displeji zobrazí „Lo“ okamžitě vyjměte/vyměňte baterie. Pro výměnu baterie otevřete prostor pro baterie na spodní straně váhy.

3. Obecné informace

3.1 Technické údaje

Max. rozsah:	20 kg
Velikost dílku (d):	5 g
Rozměry:	280 x 600 mm, výška 90 mm vpředu a 100 mm vzadu
Konstrukce:	ABS-kryt, čtyřbodový vážicí člen
Vážicí jednotky:	kg, lb
Kalibrační jednotka:	kg
Aplikační mód:	vážení
Displej:	LCD
Funkce:	Tárování, přepínání jednotek, ukládání posledního vážení
Pracovní teplota okolí:	+ 5 °C až + 35 °C / + 40 °F až + 95 °F
Automatické vypnutí:	po 1 min. nečinnosti
Indikátor vybité baterie:	< 4,5 V ± 0,2
Napájení:	4 x AA baterie AC adapter (jako volitelné příslušenství)

4. Účel použití

Zařízení se používá k vážení dětí do 20 kg jejich váhy. Může být použito pouze pro tento účel. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Splňuje příslušné požadavky směrnice ES 2014/35/EU a splňuje požadavky na rušení podle směrnice ES 2014/30/EU.

Tento návod k použití je součástí balení. Přísné dodržování tohoto návodu je předpokladem správného používání a správné fungování zařízení.

SOEHNLE Professional přijímá odpovědnost za bezpečnost zařízení pouze v případě, že pokyny jsou dodržovány a zařízení se provozuje v souladu s návodem k obsluze. Uživatel si musí zkontrolovat bezpečnostní prvky a stav přístroje před použitím zařízení. Obsluha se musí seznámit se správnou obsluhou zařízení. Přístroj není určen pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Nebezpečím výbuchu hrozí například hořlavá anestetika, prostředky na čištění pleti a dezinfekci kůže.

Kojenecká váha “Cosy“ 8310.02

Toto zařízení je měřicí přístroj. Průvan, vibrace, rychlé změny teploty a přímé sluneční záření může ovlivnit výsledky měření. Vyhněte se vysoké vlhkosti vzduchu, párám, agresivním kapalinám a silnému znečištění.

Nesprávná montáž zneplatní garance. Elektrické podmínky připojení musí být v souladu s hodnotami uvedenými na zdroji napětí. Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Dodržujte přípustné teploty okolí pro provoz (viz bod 3.1 Technické údaje). Toto zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Nepřekračuje maximální hodnoty stanovené ve standardech. Pokud je přístroj používán správně, neexistuje žádné riziko pro jiná zařízení. Pokud budete mít jakékoliv problémy, obraťte se na autorizovaného servisního partnera.

Varování: Toto zařízení nesmí být modifikováno bez svolení výrobce. V případě, že váha bude upravena, musí být provedeny vhodné testy a kontroly k zajištění dalšího bezpečného užívání.

4.1 Čištění

Vše, co potřebujete k čištění zařízení, je vlhký hadřík a komerčně dostupný čisticí prostředek. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch.

Následující dezinfekční prostředky jsou povoleny:

Denaturovaný líh; isopropanol; 2% Kohrsolin; 1% vodný roztok Sokrena; 5% Sagrotan; 5% Gigasept. Neostříkujte zařízení.

4.2 Údržba a servis

V případě, že zařízení nefunguje, jak by mělo a existuje podezření na poškození, musí být přístroj předán do autorizovaného servisu. Na opravu ze strany autorizovaného servisu musí být používány pouze originální náhradní díly. Tyto originální díly jsou popsány v servisní dokumentaci.

4.3 Záruka/ručení

Pokud je výrobcem nalezena závada dodávaného zboží, výrobce je oprávněn zvolit mezi opravou nebo výměnou za nový. Vyměněné díly se stávají vlastnictvím výrobce. Jde-li o vadu kterou nelze odstranit nebo je výměna neúspěšná, použijí se zákonná ustanovení.

Záruka se vztahuje na dobu 2 let od data nákupu. Pro tyto účely si prosím ponechte doklad o nákupu. Pokud vaše zařízení vyžaduje servis, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis výrobce.

Záruka nebude akceptovaná zejména v těchto případech: nevhodné (nesprávné) skladování nebo používání, chybná montáž nebo uvedení do provozu zákazníkem nebo třetí osobou, přirozené

Kojenecká váha “Cosy“ 8310.02

opotřebení, úpravy či zásahy, chybná nebo neopatrná manipulace, zejména nadměrné zatížení, chemické/elektrochemické /elektrické vlivy nebo vlhkost, pokud tyto nelze přičítat výrobcí. Záruka se neuplatní, pokud provozní, klimatické či jiné vlivy způsobí podstatné změny v podmínkách fungování nebo stavu materiálu přístroje.

Opotřebitelné díly jsou pokryty 6 měsíční zárukou.

Uchovejte prosím originální obal pro případ potřeby zaslat váhu zpět k reklamaci.

4.4 Likvidace baterií



Baterie, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem zobrazující přeškrtnutý odpadkový koš a nesmí se nimi nakládat jako s běžným domovním odpadem. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen vrátit použité baterie. Staré baterie mohou být předány jako speciální odpad na místech veřejných recyklačních ve vaší čtvrti nebo v obchodech, ve kterých se prodávají baterie podobných druhů. Tyto symboly jsou uvedeny na bateriích obsahujících nebezpečné látky: Pb = baterie obsahující olovo, Cd = baterie obsahující kadmium, Hg = baterie obsahující rtuť.

4.5 Likvidace

Podle současných znalostí, toto zařízení neobsahuje žádné látky, které jsou zvláště škodlivé pro životní prostředí. Nesmí se ním zacházet jako s běžným odpadem, ale předat do sběrného místa, kde se recyklují elektrická a elektronická zařízení. Další informace o jiných způsobech recyklace získáte na obecním úřadu, místní službě pro nakládání s odpady, nebo ve společnosti, kde byl tento výrobek zakoupen.

4.6 Vysvětlení symbolů na obalu



Pozor křehké



Respektujte správnou polohu během přepravy



Čtaňte před vlhkostí



Dodržujte teplotu skladování

Kojenecká váha “Cosy“ 8310.02

5. Upozornění


- > Neautorizované úpravy nebo opravy mohou poškodit váhu a způsobit tím ztrátu záruky na zboží od výrobce.
- > Displej váhy by měl být chráněn před vlhkostí. Kapaliny (např. voda) může poškodit elektroniku. K otření displeje použijte suchou utěrku.
- > Pokud váhu nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie. Tím se zabrání možnému poškození únikem elektrolytu z baterie.
- > Vyvarujte se pokládání věcí nebo závaží na váhu. To může váhu poškodit.
- > Váhu nepřetěžujte. Hmotnost vyšší než 23 kg může způsobit poškození váhy.
- > Umístěte váhu na pevný, stabilní a rovný povrch: to zaručí, že měření bude přesné. Přesnost může být ovlivněna, pokud je váha nakloněná nebo umístěna na koberci.
- > Používejte pouze originální součástky. Použitím jiných značek může dojít k poškození zařízení.

Soehnle Industrial Solutions GmbH

Zastoupení v ČR a SR:

NETTO Electronics s.r.o.

Malešická 45a, 130 00 Praha 3, CZ

 +420 271 001 850

E-mail: sales@vahyNetto.cz

<http://www.vahyNetto.cz>